

Profit

Flüssiger Einkomponenten-Modellierkunststoff auf Cyanacrylat-Basis mit Sprayaktivator.

SCHÜTZ  **DENTAL**
Micerium Group



Schütz Dental GmbH · Dieselstr. 5-6 · 61191 Rosbach/Germany
Telefon: +49 (0) 6003 814-0 · Telefax: +49 (0) 6003 814-906
info@schuetz-dental.de · www.schuetz-dental.de

Gebrauchsanweisung

Indikationen

Zur Attachment-Fixierung, zur Kronenverbindung, z. B. bei Lötlöcherherstellung und zum Fixieren von Gipsteilen.

Kontraindikation

Profit ist nicht für die Anwendung im Mund bestimmt. Sollte eine Allergie gegen einen in der Zusammensetzung aufgeführten Stoff bekannt sein, ist auf die Anwendung zu verzichten.

Eigenschaften

- leichtes, sicheres Handling
- wirtschaftlich, da exakt dosierbar
- vielseitig
- zeitsparend, da jederzeit verfügbar
- multifunktionell

Verarbeitung

Verschuß der Profit-Basisflasche öffnen und Kanüle (blaue Aufnahme) aufstecken. Gewünschte Menge Profit-Basis entnehmen und auf das Objekt applizieren. Anschließend mit Profit-Härter (Schnellhärter) besprühen. Nach einer Reaktionszeit von ca. 30 sec. ist die Klebestelle belastbar. Nach der Anwendung ist die Profit-Basisflasche zu schließen.

Lagerung

Bitte im Kühlschrank bei 3 °C - 9 °C lagern.

Lieferform

Set Art.-Nr. 629520
1 x 10 ml Profit-Basismaterial
1 x 50 ml Profit-Härter
2 x Kunststoff-Kanülen

629521
1 x 10 ml Profit-Basismaterial

629522
1 x 50 ml Profit-Härter

Gefahrenhinweis

Bitte beachten Sie die **Warnhinweise auf dem Etikett.**