

Wichtiger Hinweis zur Lagerung der Ratsche:

Die Feder der Ratsche sollte sofort nach Gebrauch wieder völlig entlastet werden, um eine einwandfreie Nutzung auf Dauer zu gewährleisten. Ratsche nur in entlastetem Zustand lagern. Bitte öffnen und säubern Sie die Ratsche vor jeder Sterilisation gemäß der Gebrauchsanweisung!

Mandler 02/2024 – 500

Important information regarding the storage of the torque ratchet:

After each use of the ratchet, the spring shall be released completely to ensure proper use in the long term. The ratchet must be stored in released condition. Please open and clean the ratchet before sterilisation according the instruction manual!